

Cuidados que debe tener el Paciente con el Oxígeno Medicinal



No FUMAR



No tenga el cilindro cerca del FUEGO.



No tenga el cilindro al SOL directo.



No mezcle grasa con el Oxígeno, provoca FUEGO



No deje el Cilindro en superficies irregulares y fije el cilindro para evitar una posible caída



No permita que los NIÑOS jueguen cerca del cilindro.



No tenga el cilindro en lugares peligroso.



No utilice martillos, ni pinzas para abrir el cilindro.



Utilice las herramientas adecuadas.



La válvula cierra en sentido de las manecillas del reloj.



Si el cilindro presenta alguna FUGA llame de inmediato a AGA.



No mueva el vaso de agua de manera brusca.



No golpee el cilindro con alguna herramienta.



La dosificación (lts/min) debe ser bajo prescripción medica.



Mantenga el vaso humidificador con agua y limpio.



Solicite a AGA su oxígeno cuando el manómetro indique 500 lbs./PIg 2 de presión.

500 LB/PIg²
35 kg/cm²

Llame a AGA S.A para
Solicitar su Oxígeno

Llamadas sin costo

0800 4050

Servicio las 24 hrs. los 365 días del año.

**4 Pasos a seguir para solicitar su
Oxígeno Domiciliario**

1. Proporcione los datos solicitados, a la Persona que le está tomando su Pedido.
2. Confirme la dirección de entrega del servicio aportando la mayor cantidad de datos.
3. Tome nota del nombre de la Persona que le está recibiendo su pedido.
4. Haga su solicitud cuando el manómetro indique 500 lbs/pulg² ó 35 kgs/cm²

**Recuerde, este equipo
medicinal es Propiedad de
AGA S.A.**

**Queda prohibido expresamente al
paciente (cliente) prestar o ceder
en forma alguna a terceras
personas el equipo asignado para
el suministro de Oxígeno
Medicinal.**

E-Mail: 08004050@uy.aga.com

Tel: 308 98 69 * **Telefax:** 308 90 36

Linde Gas | **AGA**